

Sonic Alert

Sonic Boom Budík s vibračním polštářkem

Model SBB500SS



Návod k obsluze

- DŮLEŽITÉ** – Prosíme pročtěte si tento návod pečlivě před prvním použitím výrobku a uschovejte si návod pro budoucí použití.
- K připojení přístroje použijte pouze adaptér dodávaný v originálním balení s výrobkem.

Varování:

Aby se předešlo nebezpečí požáru či úrazu elektrickým proudem, nevystavujte výrobek dešti či vlhkosti. Před zapojením do elektrické sítě se ujistěte, že odpovídá na přístroji uvedené napětí 120 V~ 60Hz nebo 230 V~ 50 Hz. Ventilační otvor přístroje nesmí být blokován předměty jako noviny, kusy látky apod. Na přístroj nesmí být umísťovány žádné zdroje otevřených plamenů jako např. svíčky. Výrobek nesmí být vystaven vlhkosti, na výrobek nesmí být umísťovány předměty naplněné vodou jako např. vázy. Výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů s nedostatkem odvětrání jako např. police na knihy, kredenc a různé jiné skříně.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Příkon: Adapter 9 V~ 900 MA

Vyrobeno v Číně

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083 USA

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY



Symbol blesku v trojúhelníku Vás upozorňuje na nebezpečné elektrické napětí uvnitř přístroje.


POZOR:

ABY SE ZAMEZILO RIZIKU VZNIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE KRYT NA ZADNÍ STRANĚ VÝROBKU. UVNITŘ VÝROBKU SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ MOHOU BÝT OPRAVOVÁNY UŽIVATELEM. PRO SERVIS A ÚDRŽBU SE OBRAŤTE NA SVÉHO DODAVATELE.



Vykřičník v trojúhelníku Vás upozorňuje na důležité informace o výrobku.

VAROVÁNÍ: ABY SE ZAMEZILO VZNIKU POŽÁRU ČI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE VÝROBEK DEŠTI A VLHKOSTI.

- Baterie likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
-  označuje místo sběru elektrického odpadu.

Sonic Alert

Vyrobeno v Číně

Sonic Alert 1050 East Maple Rd. Troy, MI 48083 USA

www.SonicAlert.com 1-800-566-3210 V/TTY



NÁVOD K POUŽITÍ
BUDÍK S VIBRAČNÍM POŠTÁŘKEM
MODEL SBB500SS

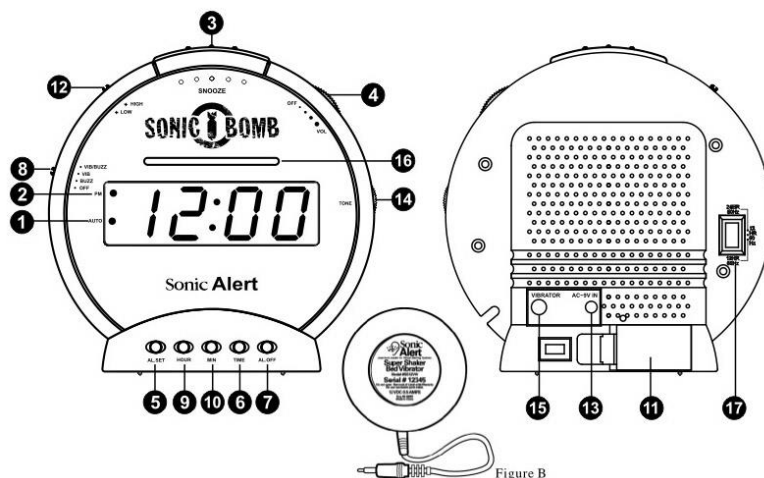


Figure B

- | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1) Indikátor alarmu | 7) Zrušení alarmu | 13) Síťový adaptér |
| 2) Indikátor AM/PM | 8) Výběr typu alarmu | 14) Nastavení tónu alarmu |
| 3) Odložení buzení | 9) Hodinové tlačítko | 15) Nastavení vibrací |
| 4) Regulace hlasitosti | 10) Minutové tlačítko | 16) Světelný indikátor |
| 5) Nastavení alarmu | 11) Místo pro baterie | 17) Nastavení formátu času |
| 6) Nastavení času | 12) Stmívání displeje | |

Nastavení správného času

- 1) Stiskněte a držte tlačítko nastavení času (6) a zároveň mačkejte hodinové (9) či minutové (10) tlačítko, abyste nastavili požadovaný přesný čas.
- 2) Indikátor AM/PM (2, pro 12hodinový formát času) značí PM; pokud indikátor nesvítí, značí to AM.

Nastavení času alarmu (buzení)

- 1) Postupujte podle instrukcí pro nastavení správného času výše, jen místo tlačítka Nastavení času (6) držte tlačítko Nastavení alarmu (5).
- 2) Ujistěte se, že nastavujete čas dopolední (AM) či odpolední (PM). Nesvítí-li Indikátor AM/PM (2), značí to AM.

Nastavení druhu alarmu

- 1) Přepínačem Výběr typu alarmu (8) vyberte hodnoty „VIB“, „BUZZ“ nebo „VIB/BUZZ“.
- 2) Ovladačem Regulace hlasitosti (4) nastavte požadovanou hlasitost alarmu.

Záložní baterie: Vložte 9voltovou baterii do Místa pro baterie (11); baterie bude sloužit jako záloha pro případ výpadku elektrického proudu. Baterie není součástí balení.

UPOZORNĚNÍ: Pro maximální jistotu doporučujeme záložní baterii měnit každých šest až osm měsíců. Pokud budík delší čas nepoužíváte, měli byste baterii vyjmout, aby se zbytečně nevybila.

Vypnutí alarmu: Alarm lze vypnout dočasně pro daný jeden den, nebo trvale.

- 1) Jakmile se alarm rozezní, jednoduše stiskněte tlačítko „AL off“ (7). Alarm se pro daný den deaktivuje a automaticky se spustí opět další den v nastavený čas.
- 2) Pro permanentní vypnutí alarmu posuňte přepínač (8) do pozice vypnuto. Alarm se opět aktivuje v nastavení čas, pokud předtím přesunete tento přepínač do pozice “VIB”, “BUZZ” nebo “VIB/BUZZ”.

Odložení alarmu: Pro odložení alarmu stiskněte tlačítko SNOOZE (3) po zaznění alarmu. Buzení alarmem se automaticky odloží o 9 minut, následně se alarm opět rozezní. Toto lze opakovat po dobu jedné hodiny.

Nastavení tónu alarmu: Pro nastavení tónu alarmu použijte ovladač (14) umístění po pravé straně budíku pod ovladačem hlasitosti.

Hlasitost: Pro nastavení hlasitosti použijte ovladač hlasitosti (14) umístěný po pravé straně budíku nahoře.

Vibrační polštářek

- 1) Kabel vibračního polštářku zapojte do zdířky na zadní straně budíku (15).
- 2) Aby byl vibrační polštářek aktivní, je třeba ovladač (8) nastavit do polohy “VIB” nebo “VIB/BUZZ” (VIB indikuje vibrační polštářek).
- 3) Vibrační polštářek umístěte pod polštář nebo matraci.

Připojení síťového adaptéru: Adaptér z elektrické sítě připojte do příslušné zdířky na straně budíku (13) vedle zdířky pro připojení vibračního polštářku (15). Důležité: Nezaměňte zdířky pro adaptér a pro vibrační polštářek!

Nastavení formátu času a elektrického proudu: Vyberte jedno z nastavení, které odpovídají Vašemu umístění. pro USA: 12/60 Hz; pro Evropu mimo Velkou Británii 24/50 Hz; pro Velkou Británii 12/50 Hz. Při nesprávném nastavení může dojít k ukazování nepřesného času.